

Gebrauchsanweisung und Anziehanleitung für orthopädische Einlagen

Inhalt

1 Wichtige Hinweise	2
2 Allgemeine Informationen	2
3 Anziehanleitung	2
4 Beschreibung der Einzelbestandteile	2
5 Medizinisch-therapeutische Aspekte	3
6 Körperpflege und Hygiene.....	3
7 Reinigung	3
8 Handhabung, Funktion und Risiken	3
9 Inspektion und Wartung.....	3
10 Entsorgung und Umweltschutz.....	3
11 Informationen für den Physiotherapeuten/Ergotherapeuten.....	3
12 Notizen.....	3

1 Wichtige Hinweise

Ihr Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne der EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 MDR.

Orthopädische Einlagen sollen helfen, Ihre Gesundheit zu erhalten und wiederherzustellen, Ihre Beschwerden zu beseitigen und Folgeschäden zu vermeiden.

▲ Hinweise

- Besprechen Sie alle Maßnahmen zur Funktionserhaltung und -verbesserung, sowie Pflege und Hygiene des betroffenen Körperteils mit Ihrem Arzt.

- Bei allergischen Reaktionen suchen Sie bitte Ihren Arzt auf, um eine Klärung zu erreichen.

▲ Warnung

- Der direkte Kontakt von Ledermaterialien mit verletzter Haut ist unbedingt zu vermeiden

2 Allgemeine Informationen

Sonderanfertigung

Die Firma Jaeger Orthopädie erklärt hiermit alleinverantwortlich, dass die oben genannte Sonderanfertigung individuell hergestellt wurde und den grundlegenden Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 entspricht. Sollten bestimmte grundlegende Forderungen nicht eingehalten worden sein, so wurden sie aufgeführt. Die entsprechende Produktdokumentation wird aufbewahrt. Diese Konformitätserklärung bezieht sich nur auf die im Rahmen der Sonderanfertigung für den oben genannten Patienten individuell angefertigten Komponenten. Für etwaige konfektionierte Hilfsmittel sind die jeweiligen Hersteller verantwortlich.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie haben von unserem orthopädieschuhtechnischen Fachbetrieb ein speziell verordnetes und individuell für Sie hergestelltes Hilfsmittel als Sonderanfertigung erhalten. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, sie enthält viele wichtige Informationen und Sicherheitshinweise.

Das Hilfsmittel ist nicht für die Anwendung durch andere Personen vorgesehen, da es speziell auf Ihre Bedürfnisse und Maße abgestimmt wurde.

Die Tragedauer Ihrer orthopädischen Einlagen beträgt maximal ein Jahr und des Weiteren bieten wir unsere Passformgarantie an.

Ihre orthopädischen Einlagen sollen zu jeder Zeit beschwerdefrei sitzen. **Übermäßiger Druck oder Scheuerstellen können zu Komplikationen führen. Sollten Probleme auftreten, so bitten wir Sie, sich umgehend an uns oder Ihren behandelnden Arzt zu wenden.**

Um die Funktion und Sicherheit Ihrer orthopädischen Einlagen zu erhalten, ist diese sorgfältig zu behandeln! **Jede Art von Überbelastung oder unsachgemäßer Handhabung kann zu Funktionseinschränkungen bis hin zu Materialbrüchen führen.** Haben Sie weitere Fragen im Umgang mit Ihren orthopädischen Einlagen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

3 Anziehenanleitung

Einlagen sollen nur in den dafür vorgesehenen Schuhen getragen werden, die genügend Volumen aufweisen.

4 Beschreibung der Einzelbestandteile

Die Beschreibung der Einzelbestandteile können Sie beim Hersteller einsehen.

5 Medizinisch-therapeutische Aspekte

s. auch Klinische Bewertungen

6 Körperpflege und Hygiene

Über das Maß der allgemeinen Körperpflege hinaus besteht die Notwendigkeit die Haut besonders im Bereich der Füße gut zu beobachten.

7 Reinigung

Damit Ihre orthopädischen Einlagen lange ihren Dienst tun, Pflegen Sie diese bitte regelmäßig. Wir beraten Sie gerne über spezielle Pflege und Reinigungsmittel.

8 Handhabung, Funktion und Risiken

Sitz, Form und Funktion Ihrer orthopädischen Einlagen wurden durch Ihren Orthopädie-Schuhtechniker kontrolliert. Achten Sie stets darauf, dass Ihre orthopädischen Einlagen beschwerdefrei sitzen!

Übermäßiger Druck bzw. Druckstellen, Reizungen, Wundreibungen der Haut oder gar Ödeme führen zu Komplikationen und sind nicht zu akzeptieren! Bei starker Schweißbildung können in seltenen Fällen allergische Reaktionen auf der Haut auftreten.

9 Inspektion und Wartung

Einen Kontrolltermin vereinbaren Sie bitte 4 Wochen nach Auslieferung. Bei Schmerzen oder Veränderungen aufgrund der Schuhe, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit uns auf (Bringen Sie bitte ein Wechselpaar mit).

Bei Diabetikern können die Kontrolltermine abweichen.

10 Entsorgung und Umweltschutz

Im Sinne unserer Aktivitäten für den Umweltschutz bitten wir Sie, Ihre orthopädischen Einlagen ordnungsgemäß im Restmüll zu entsorgen.

11 Informationen für den Physiotherapeuten/Ergotherapeuten

Der Patient / die Patientin wurde in unserem Hause umfassend orthopädietechnisch versorgt.


Um die optimale Versorgungsstrategie umzusetzen, ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich.

Bei eventuell auftretenden Fragen stehen Ihnen unsere Spezialisten jederzeit telefonisch (siehe Rückseite) oder auch per E-Mail zur Verfügung.

12 Notizen

Ort/Datum: Lahnstein, den 24.05.2021

Name, Position: Thomas Jaeger, Geschäftsführer

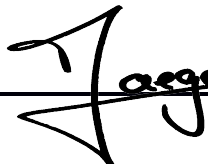

Orthopädietechnik W. Jaeger GmbH
Hemdsdorferstr. 3 · 58112 Lahnstein
Tel.: 02621 / 6 23 40 · Fax: 02621 / 62 34 11
www.ortho-jaeger.de · E-Mail: info@ortho-jaeger.de