

Gebrauchsanweisung und Anziehanleitung für orthopädische Maßschuhe

Inhalt

1 Wichtige Hinweise	2
2 Allgemeine Informationen	2
3 Anziehanleitung	2
4 Beschreibung der Einzelbestandteile	2
5 Medizinisch-therapeutische Aspekte	3
6 Körperpflege und Hygiene	3
7 Reinigung	3
8 Handhabung, Funktion und Risiken	3
9 Inspektion und Wartung	3
10 Entsorgung und Umweltschutz	3
11 Informationen für den Physiotherapeuten/Ergotherapeuten	3
12 Notizen	3

1 Wichtige Hinweise

Ihr Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne der EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 MDR. Orthopädische Maßschuhe sollen helfen, Ihre Gesundheit zu erhalten und wiederherzustellen, Ihre Beschwerden zu beseitigen und Folgeschäden zu vermeiden.

▲ Hinweise

- Besprechen Sie alle Maßnahmen zur Funktionserhaltung und -verbesserung, sowie Pflege und Hygiene des betroffenen Körperteils mit Ihrem Arzt.

- Bei allergischen Reaktionen suchen Sie bitte Ihren Arzt auf, um eine Klärung zu erreichen.

▲ Warnungen

- Der direkte Kontakt von Ledermaterialien mit verletzter Haut ist unbedingt zu vermeiden

2 Allgemeine Informationen

Sonderanfertigung

Die Firma Jaeger Orthopädie erklärt hiermit alleinverantwortlich, dass die oben genannte Sonderanfertigung individuell hergestellt wurde und den grundlegenden Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 entspricht. Sollten bestimmte grundlegende Forderungen nicht eingehalten worden sein, so wurden sie aufgeführt. Die entsprechende Produktdokumentation wird aufbewahrt. Diese Konformitätserklärung bezieht sich nur auf die im Rahmen der Sonderanfertigung für den Patienten individuell angefertigten Komponenten. Für etwaige konfektionierte Hilfsmittel sind die jeweiligen Hersteller verantwortlich.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie haben von unserem orthopädienschuhtechnischen Fachbetrieb ein speziell verordnetes und individuell für Sie hergestelltes Hilfsmittel als Sonderanfertigung erhalten. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, sie enthält viele wichtige Informationen und Sicherheitshinweise.

Das Hilfsmittel ist nicht für die Anwendung durch andere Personen vorgesehen, da es speziell auf Ihre Bedürfnisse und Maße abgestimmt wurde.

Die Tragedauer Ihrer orthopädischen Maßschuhe beträgt 2 Jahre, bei Hausschuhen 4 Jahre.

Ihre orthopädischen Maßschuhe sollen zu jeder Zeit beschwerdefrei sitzen. **Übermäßiger Druck oder Scheuerstellen können zu Komplikationen führen. Sollten Probleme auftreten, so bitten wir Sie, sich umgehend an uns oder Ihren behandelnden Arzt zu wenden.**

Um die Funktion und Sicherheit Ihrer orthopädischen Maßschuhe zu erhalten, ist diese sorgfältig zu behandeln! **Jede Art von Überbelastung oder unsachgemäßer Handhabung kann zu Funktionseinschränkungen bis hin zu Materialbrüchen führen.** Haben Sie weitere Fragen im Umgang mit Ihren orthopädischen Maßschuhen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

3 Anziehanleitung

Stellen Sie Ihre Füße vor dem Zuschnüren der Schuhe auf die Hacke, um sicherzustellen, dass Sie nicht nach vorne in den Schuh rutschen. Schließen Sie die Schuhe gleichmäßig, ohne übermäßigen Druck.

4 Beschreibung der Einzelbestandteile

Die Beschreibung der Einzelbestandteile können Sie beim Hersteller einsehen.

4 Medizinisch-therapeutische Aspekte

s. auch Klinische Bewertungen

5 Körperpflege und Hygiene

Über das Maß der allgemeinen Körperpflege hinaus besteht die Notwendigkeit die Haut besonders im Bereich der Füße gut zu beobachten.

6 Reinigung

Damit Ihre Schuhe lange ihren Dienst tun, Pflegen Sie diese bitte regelmäßig. Wir beraten Sie gerne über spezielle Pflege und Reinigungsmittel.

7 Handhabung, Funktion und Risiken

Sitz, Form und Funktion Ihrer orthopädischen Maßschuhe wurden durch Ihren Orthopädie- Schuhtechniker kontrolliert. Der alltägliche Umgang muss allerdings insbesondere bei Erstversorgungen zunächst erlernt werden. Das An- und Ablegen sowie die allgemeine Handhabung bedarf eines gewissen Trainings. Ihr Orthopädie- Schuhtechniker hat mit Ihnen die geeignete Technik des An- und Ablegens geübt. Achten Sie stets darauf, dass Ihre orthopädischen Maßschuhe beschwerdefrei sitzen!

Übermäßiger Druck bzw. Druckstellen, Reizungen, Wundreibungen der Haut oder gar Ödeme führen zu Komplikationen und sind nicht zu akzeptieren! Bei starker Schweißbildung können in seltenen Fällen allergische Reaktionen auf der Haut auftreten

8 Inspektion und Wartung

Einen Kontrolltermin vereinbaren Sie bitte 4 Wochen nach Auslieferung. Bei Schmerzen oder Veränderungen aufgrund der Schuhe, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit uns auf (Bringen Sie bitte ein Wechsellpaar mit).
Bei Diabetikern können die Kontrolltermine abweichen.

9 Entsorgung und Umweltschutz

Im Sinne unserer Aktivitäten für den Umweltschutz bitten wir Sie, Ihre orthopädischen Maßschuhe ordnungsgemäß im Restmüll zu entsorgen

10 Informationen für den Physiotherapeuten/Ergotherapeuten

Der Patient / die Patientin wurde in unserem Hause umfassend orthopädiotechnisch versorgt.

Um die optimale Versorgungsstrategie umzusetzen, ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich.

Bei eventuell auftretenden Fragen stehen Ihnen unsere Spezialisten jederzeit telefonisch (siehe Rückseite) oder auch per E-Mail zur Verfügung.

11 Notizen

Ort/Datum: Lahnstein, den 24.05.2021

Name, Position: Thomas Jaeger, Geschäftsführer



Orthopädietechnik W. Jaeger GmbH
Hermisdorferstr. 3 · 56112 Lahnstein
Tel.: 02621 / 6 23 40 · Fax: 02621 / 62 34 11
www.ortho-jaeger.de · E-Mail: info@ortho-jaeger.de