

Gebrauchsanweisung und Anziehanleitung für Orthesen der unteren/unteren Extremität, sowie für den Korpus

Inhalt

1 Wichtige Hinweise	2
2 Allgemeine Informationen	2
3 Anziehanleitung.....	3
4 Beschreibung der Einzelbestandteile.....	3
5 Medizinisch-therapeutische Aspekte.....	3
6 Körperpflege und Hygiene	3
7 Reinigung	3
8 Handhabung, Funktion und Risiken.....	3
9 Inspektion und Wartung	3
10 Entsorgung und Umweltschutz	3
11 Informationen für den Physiotherapeuten/Ergotherapeuten	3
12 Notizen	4

1 Wichtige Hinweise

Ihr Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne der EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 MDR. Orthesen sollen helfen, Ihre Gesundheit zu erhalten und wiederherzustellen, Ihre Beschwerden zu beseitigen und Folgeschäden zu vermeiden.

▲ Hinweise

- Besprechen Sie alle Maßnahmen zur Funktionserhaltung und -verbesserung, sowie Pflege und Hygiene des betroffenen Körperteils mit Ihrem Arzt.
- Bei allergischen Reaktionen suchen Sie bitte Ihren Arzt auf, um eine Klärung zu erreichen.

▲ Warnungen

- Bei Druckstellen kontaktieren Sie umgehend den Hersteller
- Der direkte Kontakt von Ledermaterialien mit verletzter Haut ist unbedingt zu vermeiden

2 Allgemeine Informationen

Sonderanfertigung

Die Firma Jaeger Orthopädie erklärt hiermit alleinverantwortlich, dass die oben genannte Sonderanfertigung individuell hergestellt wurde und den grundlegenden Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 entspricht. Sollten bestimmte grundlegende Forderungen nicht eingehalten worden sein, so wurden sie aufgeführt. Die entsprechende Produktdokumentation wird aufbewahrt. Diese Konformitätserklärung bezieht sich nur auf die im Rahmen der Sonderanfertigung für den Patienten individuell angefertigten Komponenten. Für etwaige konfektionierte Hilfsmittel sind die jeweiligen Hersteller verantwortlich.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie haben von unserem orthopädiotechnischen Fachbetrieb ein speziell verordnetes und individuell für Sie hergestelltes Hilfsmittel als Sonderanfertigung erhalten. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, sie enthält viele wichtige Informationen und Sicherheitshinweise. Das Hilfsmittel ist nicht für die Anwendung durch andere Personen vorgesehen, da es speziell auf Ihre Bedürfnisse und Maße abgestimmt wurde.

Die Tragedauer Ihrer Orthese beträgt 3-5 Jahre.

Ihre Orthese soll zu jeder Zeit beschwerdefrei sitzen. **Übermäßiger Druck oder Scheuerstellen können zu Komplikationen führen. Sollten Probleme auftreten, so bitten wir Sie, sich umgehend an uns oder Ihren behandelnden Arzt zu wenden.**

Um die Funktion und Sicherheit Ihrer Orthese zu erhalten, ist diese sorgfältig zu behandeln! **Jede Art von Überbelastung oder unsachgemäßer Handhabung kann zu Funktionseinschränkungen bis hin zu Materialbrüchen führen.** Haben Sie weitere Fragen im Umgang mit Ihrer Orthese, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Nehmen Sie selbst **keine** Veränderung an Ihrer Orthese vor!

3 Anziehenanleitung

Tragen Sie immer einen faltenfreien Strumpf (Baumwolle) unter der Orthese. Schließen Sie die Orthese gleichmäßig, ohne übermäßigen Druck.

4 Beschreibung der Einzelbestandteile

Die Beschreibung der Einzelbestandteile können Sie beim Hersteller einsehen.

5 Medizinisch-therapeutische Aspekte

s. auch Klinische Bewertungen

6 Körperpflege und Hygiene

Über das Maß der allgemeinen Körperpflege hinaus besteht die Notwendigkeit die Haut besonders im Bereich der Orthese gut zu beobachten.

7 Reinigung

Damit Sie lange einen Nutzen von Ihrer Orthese haben, pflegen Sie diese bitte regelmäßig. Wir beraten Sie gerne über spezielle Pflege und Reinigungsmittel.

8 Handhabung, Funktion und Risiken

Sitz, Form und Funktion Ihrer Orthese wurde durch Ihren Orthopädietechniker kontrolliert. Der alltägliche Umgang muss allerdings insbesondere bei Erstversorgungen zunächst erlernt werden. Das An- und Ablegen sowie die allgemeine Handhabung bedarf eines gewissen Trainings. Ihr Orthopädietechniker hat mit Ihnen die geeignete Technik des An- und Ablegens geübt. Achten Sie stets darauf, dass Ihre Orthese beschwerdefrei sitzt!

Übermäßiger Druck bzw. Druckstellen, Reizungen, Wundreibungen der Haut oder gar Ödeme führen zu Komplikationen und sind nicht zu akzeptieren! Bei starker Schweißbildung können in seltenen Fällen allergische Reaktionen auf der Haut auftreten

9 Inspektion und Wartung

Sollten Sie noch keinen Kontrolltermin erhalten haben, vereinbaren Sie bitte einen Termin für in 4 Wochen nach der Auslieferung. Bei Schmerzen oder Veränderungen aufgrund der Orthese, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit uns auf.

Ihre Orthese bedarf eine regelmäßige Wartung. Dieser Zyklus wurde Ihnen bei der Abgabe mitgeteilt und ist verpflichtend einzuhalten. (Sicherheit der Funktion!)

Bei Diabetikern können die Kontrolltermine abweichen.

10 Entsorgung und Umweltschutz

Im Sinne unserer Aktivitäten für den Umweltschutz bitten wir Sie, Ihre Orthese ordnungsgemäß im Restmüll zu entsorgen. Alternativ übernehmen wir für Sie die Entsorgung.

11 Informationen für den Physiotherapeuten/Ergotherapeuten


Der Patient / die Patientin wurde in unserem Hause umfassend orthopädietechnisch versorgt.

Um die optimale Versorgungsstrategie umzusetzen, ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich. Bei eventuell auftretenden Fragen stehen Ihnen unsere Spezialisten jederzeit telefonisch (siehe Rückseite) oder auch per E-Mail zur Verfügung.

12 Notizen

Ort/Datum: Lahnstein, den 24.05.2021

Name, Position: Thomas Jaeger, Geschäftsführer

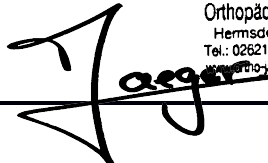

Orthopädietechnik W. Jaeger GmbH
Hernsdorferstr. 3 · 56112 Lahnstein
Tel.: 02621 / 6 23 40 · Fax: 02621 / 62 34 11
www.ortho-jaeger.de · E-Mail: info@ortho-jaeger.de